



- Isolert, rustfritt stålskap
- Frostsikret til (-40 °C)
- Ekstra front-varmelegeme (-20 °C till -40 °C)
- Vifte for ventilasjon
- 2 x LED-lys (hjertestarter synlig i mørket)
- Utformet slik at det kan åpnes selv om det utsettes for store mengder snø og frost.
- Fremtidssikrer! (software kan oppgraderes)

FUNKSJONSBEKRIVELSE:

Når man åpner døren på skapet...	Starter ALARMEN med en gang. (om døren ikke lukkes innen 3 minutter stopper ALARMEN automatisk)
Når døren lukkes...	Er skapet klart til bruk igjen.

TEKNISK BESKRIVELSE:

Dør:	Døren har termoglass og er montert med internasjonale AED (automatisk hjertestarter)
Lys:	2 x LED-lys i skapet, så man kan se hjertestarteren i mørket.
Alarm:	Alarm i skapet. (100 dBA / 1 m)
Vifte:	Ventilasjonsvifte, starter ved +40 °C.
Frostfritt skap:	Termostatstyrt varmelegeme. Frostsikret til -40 °C
Spennings:	Skal kobles til 230V (116Wh) Utekabel (3 x 1,5 mm²)
Overspenningskategori:	Cat II, IE IEC 61010-1
Tetthetsgrad:	IP43.
Omgivelsestemperatur:	-40 / +40°C
Relativ fuktighet:	0 - 95 %
Miljø - forurensningsgrad:	2
Høyde bruksområde:	Maks 2000 m.o.h. (meter over havet)
Designnorm:	IEC61010 – med avvik på isolasjon brannklasse og servicebryter.
Isolasjon – brannklasse:	E / F (EN13501)
Utvendige mål:	B x H x D = 44 x 46 x 27 cm (inkl. dørhåndtak)
Innvendig mål:	B x H x D = 33 x 38 x 20 cm
Vekt:	Brutto vekt inkl. emballasje 18,5 Kg.

VEDLIKEHOLD/RENGJØRING:

Vi anbefaler utvendig rengjøring av skapet minst 1–2 ganger i året.
Bruk sulfo på en fuktig klut eller børste, og skyll med rent vann. Tørk tilslutt av med en tørr klut.

Hvis rust eller irr oppstår, er det avleiringer på overflaten, og dette vil lett kunne vaskes vekk.
Bruk skuresvamp til vanskelige avleiringer. **Bruk aldri stålull.**