

1. Plassering av skap.
2. Skapet monteres på vegg eller stativ.
3. Strømtilkobling. Spennning 230 V skal kobles til via HPFI-relé. (jordfeilbryter).
4. Datablad.
5. Vedlikehold/rengjøring.

1. Anbefalt monteringshøyde (se tegning)

Skapet er laget for å tåle oppheng under alle normale forhold.


Vedlikeholdsmessig vil det alltid være en fordel å henge opp hjertestarterskapet slik at det får minst mulig direkte sollys.

Dersom skapet blir montert under et tak der det ikke blir vasket naturlig (*regnvann*).


Anbefales regelmessig vask av skapet, da det lett kan forekomme avleiringer.

Miljø:	For innendørs og utendørs bruk
Tetthetsklasse:	IP 43 – tåler kraftig regn, men skal ikke spyles.
Høyde:	Kan brukes i høyder opp til 2000 m
Temperaturer:	-40 til +40 °C.
Relativ fuktighet:	0 – 80 %
Overspenningskategori:	Cat II
Forurensningsklasse:	Grad 2

Wall side view

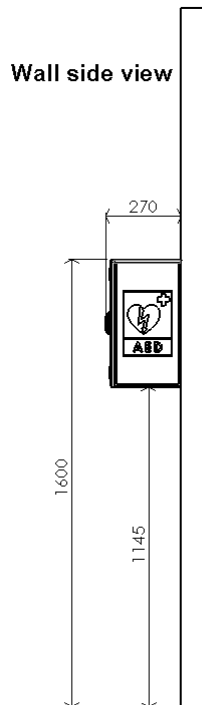

Wall viewed from the front

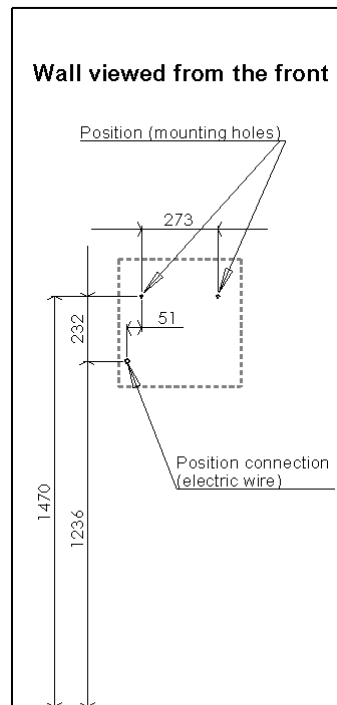

2. Skapet monteres fast på vegg eller stativ ved hjelp av de to hullene i bakplaten.

(Veggen må være rett og stabil, SKAPET MÅ IKKE VRIS)



3. EL-INSTALLASJON SKAL UTFØRES AV AUTORISERT ELEKTRIKER

Skapet skal forsynes med 230 V, og vi anbefaler at dette gjøres fra egen EL-gruppe.


PG M16 og blindpropp kan monteres fast bak på skapet eller i bunnen, alt etter ønsket installasjon.



Løsne de to unbrakoskruene ved dekkplaten med LED-lys og sving platen ut.





Nå har du fri adgang til styringen der fase, null og jordleder skal monteres.

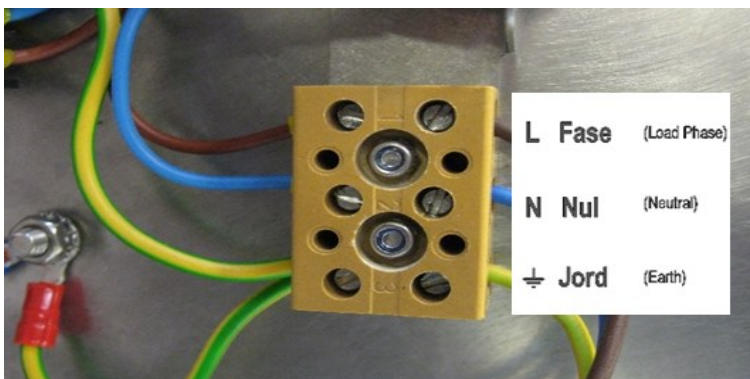

Ved service, slå av alarmen. Bruk unbrakonøkkelen til å trykke 1 gang på serviceknappen.

Åpne dekkplaten med LED-lys og sving platen ut. Koble av derefter spenning til print, trykk på vippekontakten.

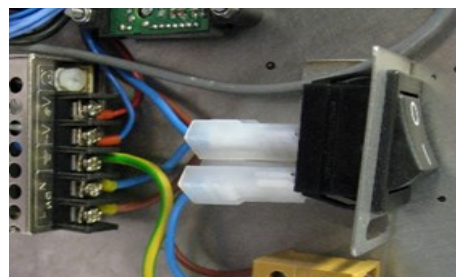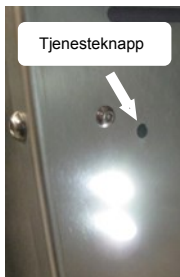

4. Datablad:
- Den elektriske tilkoblingen SKAL beskyttes av en HFI-jordfeilbryter – 30mA.
Tilkoblingsspenning 230VAC. 50Hz. Maks. forsikring maks 10A. (Fase, Null og Jord)
Utendørs kabel, 3 x 1,5 mm²

Strømforbruk ved normal drift = 40 mA / 10,2 W
Max. strømforbruk inkl. varmelegeme = 500 mA / 116 W

5. Vedlikehold/rengjøring:
- Vi anbefaler utvendig rengjøring av skapet minst 1–2 ganger i året.
Bruk sulfo på en fuktig klut eller børste, og skyll med rent vann. Tørk tilslutt av med en tørr klut.
Hvis rust eller irr oppstår, er det avleiringer på overflaten, og dette vil lett kunne vaskes vekk.
Bruk skuresvamp til vanskelige avleiringer. **Bruk aldri stålull.**